

	Јавна здравствена установа Болница „Свети Врачеви“ Бијељина Српске војске 53			МИ-10-009
Преглед узорака урогениталног тракта на <i>Trichomonas vaginalis</i>				
Страна 1 од 1	Издање:	Важи од:	Одобрио:	Копија број
	1	2021-04-15	др Санда Лазић руководилац Службе за микробиологију са паразитологијом	Е

Назив анализе	Преглед узорака урогениталног тракта на <i>Trichomonas vaginalis</i>
Врста узорка	Брис уретре, цервикални брис, вагинални брис, седимент урина, експримат простате
Узимање и транспорт узорка	У складу са упутством УП-10-135: Узимање и транспорт узорака за микробиолошку дијагностику.
Пријем и протокол	У складу са упутством УП-10-008: Пријем пацијената, захтјева и руковање узорцима у Служби за микробиологију са паразитологијом.
Обрада узорка	Узорак се наноси на предметно стакло (код брисева се дода кап физиолошког ратвора, тем 37°C) и микроскопира под увећањем 10х, а према потреби на увећању 40х.
Реагенси	Потребна су обична микроскопска стакалца и поковна стакалца, физиолошки раствор
Апарати	Микроскоп
Услови рада	Оптимални микроклиматски услови за рад у лабораторији (22-25°C).
Опис анализе	Препарат се поставља на сточић микроскопа и микроскопира под увећањем 10х, односно 40х. Потребно је прегледати око 100 видних поља. Анализу је потребно извршити унутар 30 минута, односно док се препарат не осуши.
Трајање анализе	Дефинисано упутством УП-10-135: Узимање и транспорт узорака за микробиолошку дијагностику.
Издавање налаза	Начин издавања налаза је дефинисан упутством УП-10-133: Израда и дистрибуција извјештаја о резултатима испитивања у Служби за микробиологију са паразитологијом.
Биосигурносне мјере рада	Материјал и опрема намијењени за обраду за рад у лабораторији за столице користити искључиво у том простору и за описане процедуре. Не смије се преносити из једног радног подручја у други. У сваком подручју рада носити рукавице, заштитни мантил, маску. Послије сваког поступка у току обраде потребно је извршити дезинфекцију радне површине. Обрада материјала се врши уз стално кориштење плинског пламеника. По престанку рада у лабораторији врши се чишћење и дезинфекција лабораторије.
Деконтаминација	Аутоклавирање
Литература	Garcia LS, Bruckner DA: Diagnostic Medical Parasitology. 2 nd ed. Washington DC, American Society for Microbiology, 1994. Крањчић-Зеџ И, Митровић С, Арсић-Арсенијевић В и сар. Медицинска паразитологија. Савремена администрација, Београд, 2000.
Скраћенице	/
Љекар	Др Санда Лазић