

	Јавна здравствена установа Болница „Свети Врачеви“ Бијељина			УП-10-146
Поступак у случају <i>ex tempore</i> захтјева и узорака у Служби за патолошку анатомију са цитолошким дијагностиком				
Страна 1 од 2	Издање:	Важи од:	Одобрио	Копија број
	1	2021-02-23	др Видак Симић руководилац Службе за патолошку анатомију са цитолошким дијагностиком	Е

1. ПРЕДМЕТ И ПОДРУЧЈЕ ПРИМЈЕНЕ

Упутством се прописују начин регистрације и пријем захтева и узорака за хитно (*ex tempore*) испитивање, означавање, ток узорака до телефонског јављања резултата те даљи поступак са узорком у Служби за патолошку анатомију са цитолошким дијагностиком (у даљем тексту Патологија) у Јавној здравственој установи Болница „Свети Врачеви“ Бијељина.

За примјену овог упутства одговоран је руководиоца службе. Упутство примјењују лабораторијски техничари и специјалиста патолог.

2. ВЕЗА С ДРУГИМ ДОКУМЕНТИМА

УП-10-147: Процесуирање узорака у Служби за патолошку анатомију са цитолошким дијагностиком

УП-10-151: Израда, дистрибуција и архивирање извјештаја о резултатима испитивања у Служби за патолошку анатомију са цитолошким дијагностиком

3. ПОЈМОВИ И СКРАЋЕНИЦЕ

Ph број - број пријемног протокола.

Патологија- Служба за патолошку анатомију са цитолошким дијагностиком

4. ОПИС УПУТСТВА

4.1 Пријем захтјева и узорака

Узорци за *ex tempore* испитивање најављују се унапред и примају се у договорено и најављено вријеме

Кад медицински техничар из одељења Болнице донесе *Упутницу за патохистолошки преглед* и узорак на *ex tempore* испитивање у Патологији, поступак је следећи:

- провјера података на упутници (да ли су уписани сви тражени подаци),
- успоређивање података са упутнице са подацима на бочици у којој се налази послати узорак
- потписивање лаборанта у свеску медицинског техничара (ако је све у реду), чиме се потврђује да је примљен узорак,
- ако се подаци не подударају, лаборант је дужан да одбије пријем узорка и упутнице,
- на упутницу се уписује протоколарни број патологије (тзв Ph број) са датумом пријема узорка-материјала и време пријема,
- У Ph протокол се уписују следећи подаци (изглед протокола је следећи):

Ph број	Име и презиме	годиште	Адреса	Клиничка дијагноза	Врста узорка	Надлежни доктор	Служба/одјељење
1							
2							

Болница Бијељина	Страна 2 od 2	Издање:	Важи од:	УП-10-146
		1	2021-02-23	

- У протоколу се уз Ph број дода назнака „*ex tempore*“
- Ph број се уписује на Упутницу са датумом пријема и на бочицу у којој је узорак
- лаборант обавјештава патолога о пристизању узорка за *ex tempore* анализу

Ове послове обавља лаборант.

Испитивање узорка:

- Патолог макроскопски описује материјал (димензије, изглед и сл),
- Патолог чини серијске резове кроз материјал –узорак и описује изглед, величину и облик промјене, боју, удаљеност од ресекционих ивица,
- Узима исјечке за анализу,
- Лаборант припреми хладни сталак са медијумом,
- Патолог ставља у медијум припремљени исјечак,
- Лаборант поставља сталак у Криомикротом и заравнава исјечак,
- Лаборант чини серијске хистолошке резове кроз замрзнути материјал,
- Добијене исјечке поставља на предметно стакло,
- Кратко грије,
- Потом приступа бојењу (детаљно описано у правилима ХЕ и *ex tempore* плочица)
- По бојењу „монтажа“ предметно стакло (детаљно описано у правилима са ХЕ и *ex tempore* плочица),
- По бојењу доноси патологу на микроскопску анализу,
- Патолог чини микроскопску анализу и телефоном јавља надлежном хирургу резултат, који може бити малигно, бенигно или неопходно је сачекати дефинитивне Пх препарате,

Патолог сачињава извјештај у складу са упутством УП-10-151: *Израда, дистрибуција и архивирање извјештаја о резултатима испитивања у Служби за патолошку анатомију са цитолошком дијагностиком.*

Даљи поступак са материјалом описан у упутству УП-10-147: *Процесуирање узорака у Служби за патолошку анатомију са цитолошком дијагностиком*

5. ЗАПИСИ

Назив документа	Ознака обрасца	Документ формира	Број примјерака	Рок чувања	Мјесто чувања	Евидентирање
Пријемни протокол Службе за патолошку анатомију са цитолошком дијагностиком	-	Лабораторијски техничар	1	Трајно	Архива патологије	-